



MAXTER

MAXTER Tranquilizer equipment

WWW.MAXTER.ORG



맥스터 동물마취장비
Animal Anesthesia Equipment

Proudly Serving Since 1998

맥스터 친환경 동물마취총


Animal Tranquilizer gun

Proudly Serving Tranquilizer gun Since 1998

특허출원번호 2020040016686

맥스터 Series

Maxter 1-DS

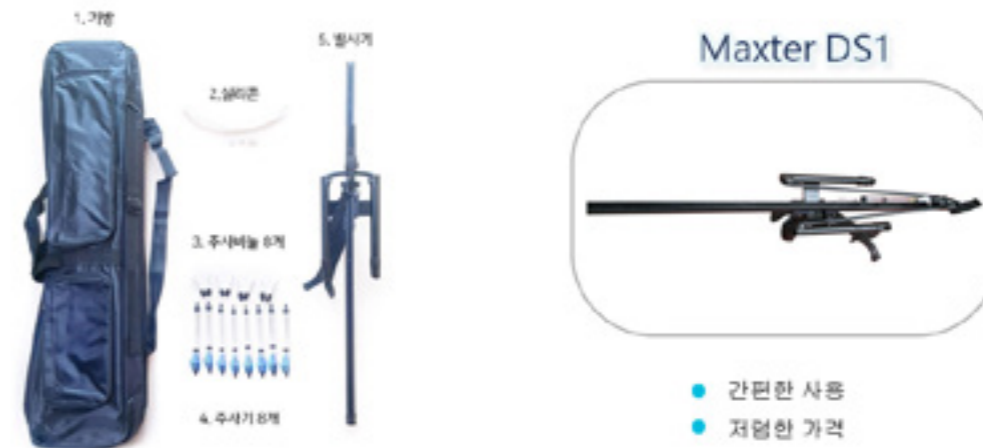

용도

동물마취, 구멍로프발사, 스킨스쿱작살발사, 임신물채취, 어로용 작살발사

제원

최대발사거리	18m	유효 거리	
로프발사거리		릴낚시거리	
전장	68cm	재질	강화알루미늄
중량	1.1kg	발사원리	라텍스탄성

비고
 왼손오른손잡이전환가능
 상하2개동시주사기발사가가능
 팔길이맞게 조절가능 원근거리 조절 가능

장전방법	p9. 참고
조준방법	p9. 참고
주의사항	p9. 참고
릴 줄 주의사항	p9. 참고
발사 해체방법	p10. 참고
주사기 사용법	p10. 참고
줄 교환 방법	p10. 참고

특징

	동물 구조	주사용품과 정량의 주사량으로 동물을 구조합니다.
	강력한 힘	석궁보다 강력하여 최장 60m발사됩니다.
	경제성	소비재의 재활용으로 추가 비용이 들지 않아 경제적입니다.
	무소음 무충격	발사 소리와충격이 적없어 사람과 동물에게 스트레스가 적습니다.
	쉬운조작	새총 원리로 강락조절이되고 조작법이 쉽습니다
	다양한활용	동물마취,로프발사,인명구조, 임신물채취 등 맥스터 한대로 다양한 사용이 가능합니다!!
	BOWFISHING	Bowfishing을 레저로 즐길 수 있습니다.

	화약총, 공기총	맥스터 동물 마취총
비용	고비용 문제,	경제적,
중량	무거운중량,	이동간편,
소음	소음 및 충격	무소음 및 무충격 민감한 동물치료에 적합



용도

동물마취, 구멍로프발사, 스킨스쿱작살발사, 임산물채취, 어로용 작살발사

제원

최대발사거리	60m	유효 거리	50m
로프발사거리		릴낙시거리	50m
전장	88cm	재질	강화알루미늄
중량	2.5kg	발사원리	라텍스탄성력
비고			

장전방법	p9. 참고
조준방법	p9. 참고
주의사항	p9. 참고
릴 줄 주의사항	p9. 참고
발사 해체방법	p10. 참고
주사기 사용법	p10. 참고
줄 교환 방법	p10. 참고



용도

동물마취, 구멍로프발사, 스킨스쿱작살발사, 임산물채취, 어로용 작살발사

제원

최대발사거리	40m	유효 거리	30m
로프발사거리		릴낙시거리	40m
전장	88m	재질	강화알루미늄
중량	2.3kg	발사원리	고무탄성력
비고			

장전방법	p9. 참고
조준방법	p9. 참고
주의사항	p9. 참고
릴 줄 주의사항	p9. 참고
발사 해체방법	p.10. 참고
주사기 사용법	p10. 참고
줄 교환 방법	p10. 참고



- 2개의 주사기를 동시에 발사할 수 있다
- 한 번에 6cc 주사기 2개 발사로 12cc까지 주사함
- 최대사거리 : 40m
- 유효사거리 : 30m



용도

동물마취, 구멍로프발사, 스킨스쿱작살발사, 임산물채취, 어로용 작살발사

용도

동물마취, 구멍로프발사, 스킨스쿱작살발사, 임산물채취, 어로용 작살발사

제원

최대발사거리	40m	유효 거리	30m
로프발사거리		릴낙시거리	40m
전장	88m	재질	강화알루미늄
중량	2.3kg	발사원리	고무탄성력
비고			

제원









최대발사거리	25m	유효 거리	20m
로프발사거리		릴낙시거리	
전장		재질	강화알루미늄
중량		발사원리	라텍스 탄성
비고			

장전방법	p9. 참고
조준방법	p9. 참고
주의사항	p9. 참고
릴 줄 주의사항	p9. 참고
발사 해체방법	p10. 참고
주사기 사용법	p10. 참고
줄 교환 방법	p10. 참고

장전방법	p9. 참고
조준방법	p9. 참고
주의사항	p9. 참고
릴 줄 주의사항	p.9 참고
발사 해체방법	p10. 참고
주사기 사용법	p10. 참고
줄 교환 방법	p10. 참고

주사기	명칭	가격
	New 주사기	15,000원
	주사기 날개(w)	5,000원
	3.5cc 주사기	9,000원
	M:짧은 주사기	12,000원
	M-Q	30,000원
	주사기 바늘	2,000원
	10cc 주사기	12,000원

석궁주사기	명칭	가격
	블로우건 주사기	6,000원
	석궁용 동물주사기	15,000원
	석궁용 마취주사기	20,000원


약세사리	명칭	가격
	블로우건세트	150,000원
	표적지	500원
	Reel 세트	10,000원
	MAXTER 가방	10,000원
	직선형 고무줄 세트	8,000원
	연결세트	10,000원
	우레탄 연결고리	2,000원
	루버 핸들링	2,000원

장전방법

1. 방아쇠의 안전장치를 앞으로 밀고, 걸림 쇠를 수직으로 세운 후 발걸이를 밟고 손잡이를 당겨서 발사상태를 유지한다.
2. 발사할 동물주사기를 총구부분에서부터 삽입한다. (**주의 점**은 주사기 뒷부분의 3개날개 중 하나가 수직으로 총구하단을 향하게 하여 **총열 윗부분이 동틈 새에서 보았을 때, 주사기의 날개가 보이지 않게** 한 후 주사바늘 등을 이용하여 **총열 뒷부분 끝까지 밀어 넣는다.**)
3. 주사기화살의 앞부분을 직물이나 손수건으로 감싼 후 잡아당겨서 MAXTER 뒷부분의 **방아**를 뒷부분에 밀어 넣어 장전되는 "**찰칵!**" 소리가 나면 완성된다.

조준방법

1. 발사준비상태에서 격발체 바로 이동틈새시작지점을 기준으로 총구 끝지점과 목표물을 일치시켜서 발사한다.
2. 구멍을 통하여 주사기화살 앞부분 돌출부위와 목표물을 일치시켜 발사하여 기준점을 잡고 거리에 따라서 상하로 오조준 한다. (거리조정과 상하좌우조절은 각개인의발사 자세와습관을 고려하여 오조준한다)
3. 동물주사기가 직선비행하는 성질을 응용지향사격하면 효과적이다.
4. 주사기 화살에 깃의 위치는 우측 그림의 형태를 유지하는 것이 정확도를 높인다.

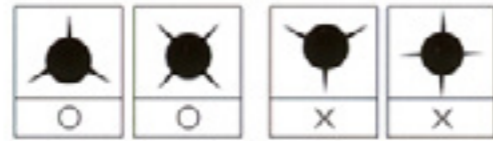

해체방법

발사상태를 해체하려면 한손으로 손잡이를 잡고, 다른 한손으로 방아쇠를 당겨서 해체한다.

주의사항

- 공타(Dry Fire)금지**
1. 동물주사기가 장전되지 않은 상태에서발사하면 격발체가 총열에서 이탈한다. 거듭 주의를 요한다
 2. 또한 발사시 총신을 잡고 있는 손이 격발체 이동로에서 완전 벗어나도록 하여야 한다.
 3. 원활한 발사를 위해 **10~20회 정도 사격 후 총열 내부에 윤활유** (자동차용 물 왁스)를 발라준다.
 4. 주사기를 화살을 **장전하기전 뒷마개가 끝까지 완전히 잠겨 있는지 확인** 후 장전한다. 소홀히 하면 **이탈 발사** 될 소지가있다.

로프 릴 줄 발사 시유의사항

릴줄을 발사에 앞서 미리40 - 50m 풀어놓고 발사한다




주사기사용법

1. 약물주사기의 고무바킹이 올라와 있을 때 살짝 눌러준다
2. 큰주사기로 고무바킹을 위아래로 조절해 약물 넣을 공간을 마련한다.
3. 약물을 주입한다.
4. 실리콘 고무마개가 된 주사바늘을 강력하게 돌려서 끼워준다.
5. 큰주사기로 약물주사기 뒤를 강하게 누른 상태에서 뽑아준다.

주사기 사용법 동영상보기

<https://youtu.be/gREKt7RUoMI>

동영상을 시청하신 후 모르는 점은 전화 문의 주십시오

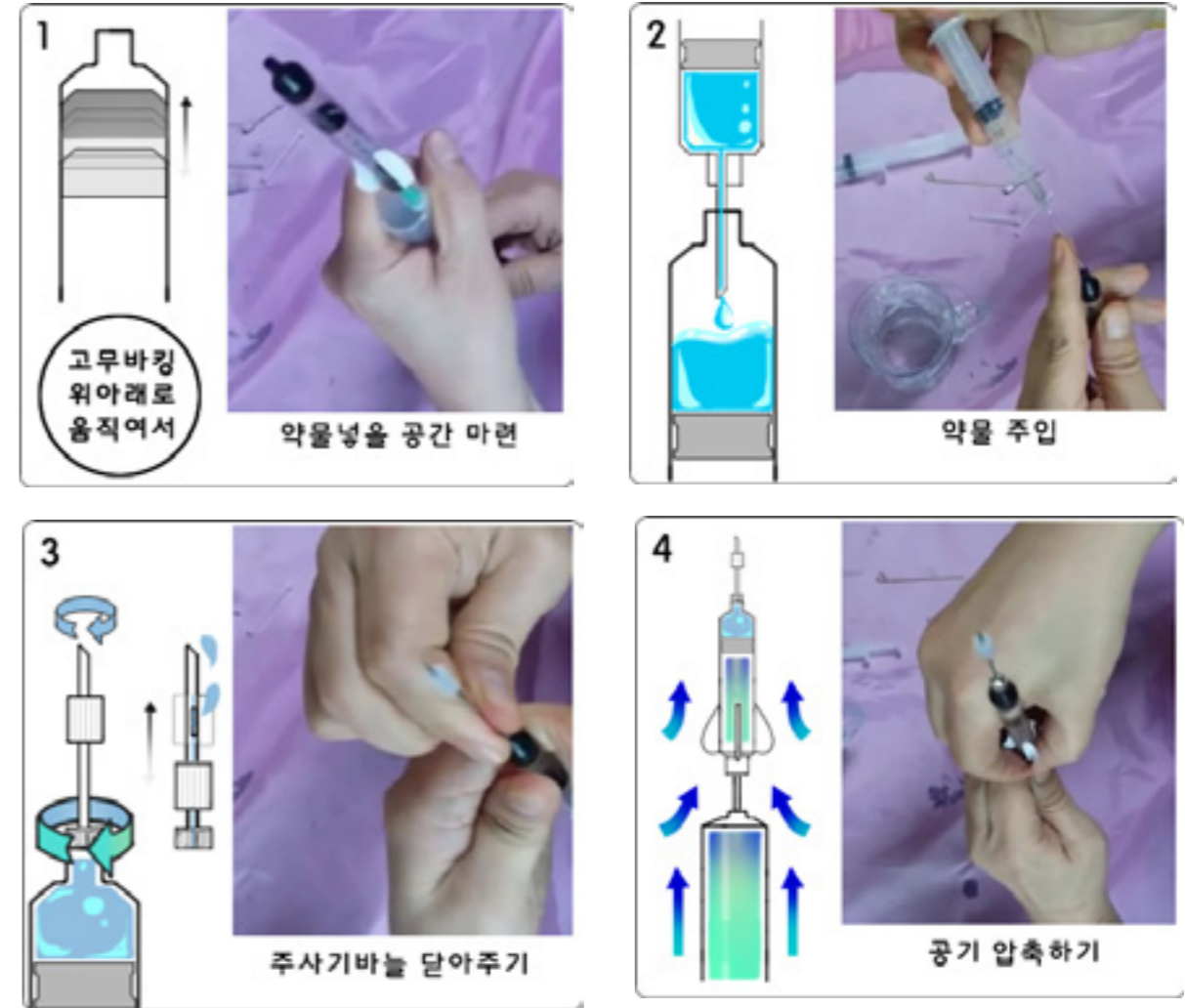

줄교환방식

1. 먼저 중심점에서 양쪽의 길이를 정확히 측정하여 표시하고'r'을 사용하여 볼을 끼운 후 케이블 타일로 묶는다.
2. 양쪽 균형의 조절은 정확도와 관련되므로 수차례 발사 후 상기방법으로 다시 조절한다.
3. 격발체의 나사를 풀어 제거 -> 총열제거 -> 교환할 라텍스줄을 고정링에 끼우기 좋게 가위로 자른 후 -> 고정링에 끼우고 라텍스 줄의 강도는 자신의 취향에 따라 조정한다.

주사기사용법

※개스충전과 공기압축 두 가지 방식 공히 **주사기 윗부분**을 열고 약물을 주입한 후 **뚜껑을 잠그고, 밑대로 윗부분 끝까지 이동박킹을 밀어올리고, 뒷부분을 잠근 후 사용한다.**

개스충전방식

1. 개스충전방식은 1회용주사바늘을 라텍스고무에 꽂아 압축실까지 통과시킨 후 그림과같이액체가스를충전한다. 주사기화살의 하단에 물방울형태의 가스가 육안으로 확인되면 압축이 완성된것으로 대략 2시간정도 압축이 유지된다.
2. 공기압축방식보다 추진력이 2배정도 강하여 많은양의 주사액도 순간적으로 주입되며 압축을 눈으로 확인하고 발사할 수 있는 장점이있다.



공기압축방식

1. 공기압축방식은 30cc 주사기를 화살뒷부분에 꽂고 7~8회 이상 펌프질을 하여 공기를압축시킨 후 물컵에 담귀 압축여부를 확인한 후 발사한다. 압축유지시간은24~28시간정도고 개스식이불 가능한 상황에서 사용한다.



● 주요 상품 2가지를 소개합니다.

마취장비 세트 Maxter DS1

1. 가방
2. 실러본
3. 주사바늘 8개
4. 주사기 3개
5. 발사기

Maxter DS1

- 간편한 사용
- 저렴한 가격

마취장비 세트 Maxter DS5

1. 가방
3. 주사바늘 8개
4. 주사기 8개

Maxter DS5

- 석궁보다 장거리 발사
- 강력한 힘

전화 . 070.7502.0940
 전화 . 010.3796.8488
 팩스 . 031.556.2750

이메일 . Maxterkr@naver.com
 사이트 . <http://www.maxter.org>
 블로그 . maxterkr.blog.me

입금계좌 . 서삼현
 농협 360-12-079385



맥스터 동물마취총
MAXTER Tranquilizer gun
 Proudly Serving Since 1998